

Zarządzenie nr 48/2025
Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Czeladzi

z dnia 31 marca 2025r.

w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego Instrukcji organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy przy obsłudze schodolazu Scalamobil

Na podstawie art. 94, pkt 4), art. 207 oraz art. 237⁴ § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.), oraz § 41 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Czeladzi
zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania Instrukcję organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy przy obsłudze schodolazu Scalamobil stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracowników Centrum Usług Społecznych w Czeladzi użytkujących schodolaz Scalamobil do pisemnego potwierdzenia faktu zapoznania się z treścią Instrukcji, o której mowa w § 1 i stosowania się do wytycznych w niej określonych.

§ 3. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Kierownikowi Zespołu Kadr i i Administracji.

§ 4. Zarządzenie należy podać do wiadomości pracownikom poprzez ogłoszenie w BIP Centrum Usług Społecznych w Czeladzi.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie nr 17/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego Instrukcji organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy przy obsłudze schodolazu Scalamobil.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Centrum Usług Społecznych
w Czeladzi
mgr Aneta Jóźwin-Rybska

INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ I HIGIENICZNEJ PRACY PRZY OBSŁUDZE SCHODOŁAZU SCALAMOBIL

UWAGI OGÓLNE

Do wykonywania pracy przy obsłudze schodołazu może być dopuszczona osoba pełnoletnia, która jest:

- zapoznana z instrukcją obsługi urządzenia
- przeszkolona w prawidłowej obsłudze urządzenia,
- umiejąca wchodzić po schodach tyłem,
- potrafiąca udźwignąć ciężar wynoszący co najmniej 20% własnej wagi ciała
- będąca w dobrej kondycji fizycznej
- stabilna emocjonalnie

Uwaga! Schodołazu nie może obsługiwać pracownik używający leków opóźniających reakcje,

- w obuwiu zamkniętym na stabilnej podeszwie



PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Sprawdzić stan techniczny schodołazu, a w szczególności czy wszystkie elementy są trwale zamocowane.
2. Sprawdzić poziom naładowania akumulatora. Po włączeniu kontrolka powinna świecić się na zielono. Jeśli kontrolka miga na zielono lub czerwono urządzenie należy naładować przed użyciem.
3. Sprawdzić czy blokada drążka poprzecznego uchwytów jest włączona i uchwyty są stabilnie zamocowane.
4. Przed każdym użyciem wykonać próbę eksploatacyjną, zgodnie z instrukcją obsługi.
5. Sprawdzić zgodnie z instrukcją obsługi czy 4 automatyczne hamulce bezpieczeństwa działają prawidłowo.
6. Sprawdzić czy żadne ciało obce np. kamień, nie dostało się do jednostki sterującej lub hamulców.
7. Ustawić wysokość uchwytów na wysokości mniej więcej klatki piersiowej operatora.
8. Sprawdzić czy wózek inwalidzki jest wyposażony w specjalne płytki mocujące do schodołazu Scalamobil.
9. Zamocować do schodołazu wózek inwalidzki lub krzesło zgodnie z instrukcją obsługi.
10. W przypadku montażu wózka inwalidzkiego przed rozpoczęciem wspinania się lub zjazdu należy zdjąć koła z wózka.

UWAGA: W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy. Należy powiadomić przełożonego. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte pracownik może przystąpić do wykonania zadania.

ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

1. Jeśli wózek inwalidzki jest wyposażony w specjalne płytki mocujące do schodołazu Scalamobil zamocować wózek do schodołazu i upewnić się, że mocowanie jest prawidłowe i stabilne.
2. Jeśli wózek inwalidzki nie jest wyposażony w specjalne płytki mocujące do schodołazu Scalamobil, osoby z ograniczonymi możliwościami ruchowymi można przewozić jedynie na krześle transportowym stanowiącym wyposażenie schodołazu. Należy upewnić się, że mocowanie krzesła do schodołazu jest prawidłowe i stabilne.
3. Do mocowania wózka inwalidzkiego lub krzesła używać wyłącznie oryginalnych bolców ryglujących alber.
4. Osobę przewożoną wraz z wózkiem inwalidzkim lub krzesłem transportowym przypiąć pasem bezpieczeństwa do schodołazu
5. Osoba przewożona powinna siedzieć prosto i opierać się plecami o oparcie wózka/krzesła, a jej stopy powinny opierać się na podnóżkach wózka/krzesła.
6. Podczas wspinania się po schodach trzymaj schodołaz z wózkiem lub krzesłem odpowiednio pochylony, tak aby koła zewnętrzne mogły zahaczyć o następny stopień.
7. Prędkość urządzenia za pomocą regulatora prędkości operator dostosowuje do swoich potrzeb i możliwości poruszania się tyłem po schodach
8. Osobom nieposiadającym wprawy w obsłudze schodołazu zaleca się włączenie funkcji „Pojedynczy krok”. Po wykonaniu pełnego cyklu obrotu kół (pokonaniu jednego stopnia) koła automatycznie wracają do pozycji równoległej i urządzenie się zatrzyma.

9. Z funkcji „pojedynczy krok”, bez względu na poziom umiejętności operatora należy korzystać r lub schodach o głębokości stopnia znacznie większej niż standardowa.
10. Osoby posiadające wprawę w obsłudze schodofazu poruszające się nim po prostych schodach o standardowej głębokości mogą korzystać z funkcji jazdy stałej (dwutaktu).
11. W razie wątpliwości co do sposobu obsługi schodofazu ponownie zapoznać się instrukcją obsługi

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

1. Zabrania się użytkowania schodofazu jeśli po włączeniu kontrolka miga na zielono lub czerwono oraz gdy świeci stale na czerwono.
2. Zabrania się ładowania schodofazu ładowarką inną niż dostarczona przez producenta schodofazu
3. Zabrania się użytkowania schodofazu jeśli którykolwiek z 4 hamulców bezpieczeństwa nie działa prawidłowo.
4. Zabrania się wypuszczania z rąk uchwytów podczas poruszania się po schodach.
5. Zabrania się poruszania się schodofazem po mokrej, śliskiej, wypastowanej powierzchni.
6. Zabrania się poruszania się schodofazem po luźnych dywanach lub wykładzinach
7. Zabrania się poruszania się schodofazem na zewnątrz na mokrej, śliskiej lub oblodzonej nawierzchni
8. Zabrania się użytkowania schodofazu na schodach, których wysokość stopni przekracza 20cm.
9. Zabrania się zastępowania oryginalnych bolców ryglujących alber, śrubami, gwoździami itp.
10. Zabrania się dotykania kół schodofazu podczas poruszania się po schodach
11. Zabrania się czyszczenia schodofazu podczas poruszania się po schodach.
12. Zabrania się użytkowania schodofazu w pobliżu gazów łatwopalnych.
13. Zabrania się użytkowania urządzenia jeśli są problemy z jego wyłączeniem
14. Zabrania się użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
15. Zabrania się samodzielnego naprawiania urządzenia.
16. Zabrania się dokonywania zmian konstrukcyjnych.

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Odstawić urządzenie w bezpieczne miejsce przechowywania.
2. Baterie schodofazu należy podłączyć do ładowania po każdym użyciu. Fabryczna ładowarka wyłączy się automatycznie po naładowaniu, co zapobiega przeładowaniu


ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

1. W przypadku awarii czy uszkodzenia niezwłocznie poinformować przełożonego.
2. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy zgłosić swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostaw w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
3. Udzielić pomocy poszkodowanemu i wezwać pomoc.

Instrukcja wchodzi w życie z dniem podpisania

Opracował	Zatwierdził
SPECJALISTA ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy	Dyrektor CUS w Czeladzi
Data i podpis	Data i podpis

**WYKAZ OSÓB
ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ BHP
PRZY OBSŁUDZE SCHODOŁAZU**

Lp.	Nazwisko i imię	Data	Podpis	Uwagi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				 WorkSafetySystem

Lp.	Nazwisko i imię	Data	Podpis	Uwagi
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				